




Paquete de Prueba Bowie-Dick Test Pack (TP02)

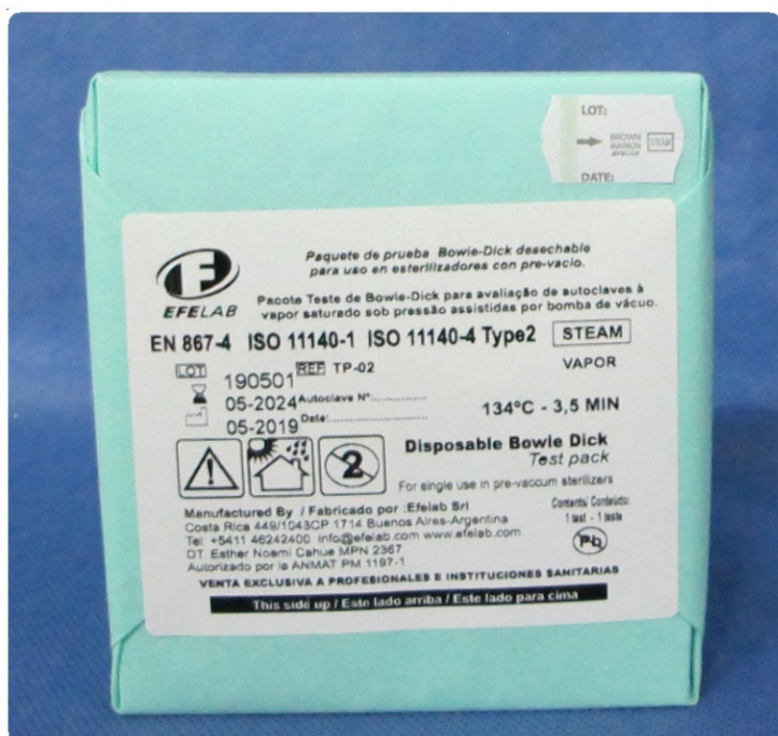

Los paquetes de prueba tipo Bowie-Dick están diseñadas para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas de aire, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de vacío, sin necesidad de armar un paquete normado. El producto esta listo para utilizar. Realice la prueba en el primer ciclo diario, antes de procesar los materiales.

Características de los paquetes de prueba Bowie-Dick (Test Pack)

La tinta química y el diseño del paquete responden a especificaciones de alto desempeño y cumplen rigurosos estándares de calidad Internacional. Diseñado y fabricado según normas UNE EN 867 parte 4 e ISO 11140-1, tipo 2. Confeccionados con envoltorio exterior de papel crepe grado medico. Indicador externo que verifica cuando el paquete fue procesado. El cambio de color del indicador es permanente, por lo que puede ser guardado como registro del ciclo de esterilización. Medidas de la hoja test 108 mm x 119 mm. Validez del producto: 60 meses desde su fecha de fabricación

Interpretación de resultado por cambio de color en tinta química

La hoja test impresa contenida en el interior del paquete cambia de color en forma homogénea si es sometido a las condiciones adecuadas del ciclo, Si observa poco cambio de color o cambio de color nulo hacia el centro de hoja, le estará indicado un nivel de vacío insuficiente en el equipo ó la presencia de fugas y/o de aire dentro del esterilizador