




Integrador Tipo 5 para Calor Húmedo / Vapor (IV57)

Ref.: 134 ° C - 0 min

121 ° C - 0 min

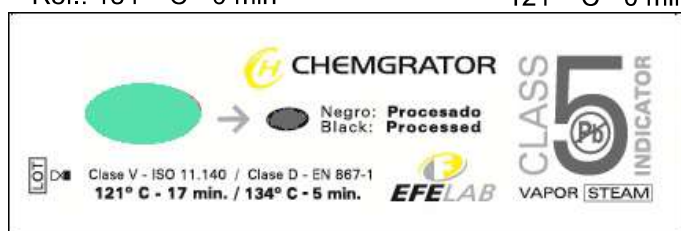

Los integradores Tipo 5 **CHEMGRATOR** están diseñados para integrar los efectos de tiempo, temperatura y presencia de vapor saturado en los procesos de esterilización.



El cambio de color del integrador solo se produce en presencia de estas tres condiciones, brindando evidencia visual inmediata si las condiciones necesarias de esterilización han alcanzadas durante el ciclo. Esto puede precarse mediante el cambio de color de la tinta sensible hasta su color de referencia



Las imágenes muestran el inicio, el cambio de color intermedio y el punto final del integrador para 134°C y 121°C.

Ref.: 134 ° C - 3.5 min

121 ° C 17 min

Características principales de los integradores multiparámetro CHEMGRATOR:

Indicador reactivo de alta fidelidad que cumple con los requerimientos para la tipo 5 de las normas ISO 11140-1 , EN 867 e IRAM-37101-1.

El integrador cambia de verde a negro y los colores inicial y final han sido impresos en cada integrador para una interpretación inmediata de los resultados del ciclo.

El cambio de color es irreversible, pudiéndose utilizarse como registro del ciclo de esterilización.

Papel de 230 gr/m2 y laminado plástico en ambas caras para óptima resistencia.

Para ser utilizado en autoclaves de vapor a 121° C -17 minutos ó 134° C-5 minutos

Vida útil del Producto : 60 meses desde su fecha de fabricación.