



Paquete de Prueba Bowie-Dick Test Pack (TP01)



Los paquetes de prueba tipo Bowie-Dick están diseñadas para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de vacío.

Características de los paquetes de prueba Bowie-Dick (Test Pack)

La tinta química y el diseño del paquete responden a especificaciones de alto desempeño y cumplen con los mas exigentes estándares de calidad Internacional Diseñado y fabricado según normas UNE EN 867 parte 4 é ISO 11140-1, clase 2. Envoltorio externo confeccionado en cartulina rígida para optima conservación del producto. Fácil apertura del paquete mediante banda pre-cortada. Indicador externo que permite verificar si el paquete fue procesado. El cambio de color de la hoja impresa con tinta sensible es permanente y puede ser guardado como registro del ciclo de esterilización. Medidas del paquete: 125 mm x 125 mm x 25mm conteniendo 210 hojas. Sus características técnicas brindan un máximo nivel de desafío al ciclo. Validez del producto: 60 meses desde su fecha de fabricación.

Interpretación de resultado por cambio de color en tinta química

Sometido a las condiciones adecuadas del ciclo, la hoja impresa con tinta sensible cambia de color en forma homogénea. Poco cambio de color o cambio de color nulo hacia el centro de la hoja le estarán indicando la presencia de fugas, aire y/o vacío insuficiente en el equipo esterilizador.